

Immerci Tulle
Dispozitiv medical
tratamentul plăgilor

Prezentare

Immerci Tulle – Pansamentul gras steril se prezintă sub forma unui suport impregnat cu bază grasă neutră din vaselină și parafină, ambalat în plic steril individual.

Referința	Forma de prezentare / Dimensiuni	Nr. buc/ cutie de vânzare	UDI-DI
42V4	Pansament gras 10 cm x 10 cm	10	5944729008228
45V4	Pansament gras 10 cm x 20 cm	10	5944729008242
43V4	Pansament gras 10 cm x 40 cm	10	5944729008259

Compoziție

- Suport alcătuit din plasă din bumbac
- Folii de protecție
- Impregnare: bază neutră alcătuită din vaselină și parafină

Beneficii clinice

- Aplicat pe plagă, pansamentul asigură o interfață de contact care creează microclimatul local favorabil procesului de cicatrizare (cicatrizare în mediu umed)
- Nu este aderent (la țesuturi) la plagă; îndepărtarea este ușoară și atraumatică
- Ușor de aplicat în cazul plăgilor localizate în zone dificile (de ex. pliuri anatomice, joncțiuni mucocutanate etc.)

Caracteristici de performanță

- Utilizarea produselor ajută la reducerea:
 - Timpului de vindecare și tratament
 - Costurilor de tratament

Indicații

- Tratamentul local al plăgilor acute: arsuri de gradul I, II a și b, excoriații, plăgi traumatice
- Tratamentul local al escarelor și al ulcerelor vasculare cronice în: fazele de granulare și de epitelizare.

Contraindicații

- Nu există contraindicații.

Instrucțiuni de utilizare

- Plaga trebuie curățată cu soluții hipertonică (ser fiziologic), înainte de fiecare utilizare a pansamentului gras
- În cazul utilizării anterioare a unui antiseptic, spălați plaga cu ser fiziologic înainte de a aplica pansamentul gras
- Pansamentul gras se aplica într-un singur strat direct pe plagă, după îndepărtarea foilor de protecție
- Acest pansament poate fi tăiat în funcție de dimensiunea și/sau forma plăgii, folosind un instrument steril
- Acoperiți plaga cu o compresă secundară (compresă sterilă din tifon sau din nețesut) și fixați cu un bandaj extensibil sau fix, adeziv sau nu
- Pansamentul se înlocuiește în fiecare zi sau la 2 zile, în funcție de procesul de vindecare a plăgii

Precauțiuni de utilizare

- Dacă apar semnele unei infecții locale, tratamentul poate fi continuat numai cu acordul medicului

Precauțiuni suplimentare

- Prezența unei plăgi profunde nu implică folosirea mai multor pansamente în același timp
- Produs de unică utilizare. A nu se resteriliza.
- Steril numai dacă ambalajul nu este deteriorat.
- Depozitare:
 - Ferit de umiditate și razele soarelui
 - Temperatura: max. 35°C.

Efecte secundare nedorite

- Nu se cunosc.

Atenționări

- Produsele sunt dispozitive medicale de unică utilizare, a nu se reutiliza! Altfel, pot apărea: iritații/ contaminare /infecții ale plăgii/sau ale pielii
- Produsul este exclusiv pentru uz extern; ingestia bazei de impregnare poate cauza probleme digestive
- În cazul persoanelor cu dizabilități mentale, produsele vor fi utilizate numai sub supravegherea unei persoane cu depline facultăți mentale
- A nu se utiliza produsul dacă ambalajul este deteriorat!
- A nu se utiliza produsul după data de expirare!
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați produsele ferit de animalele de companie. Penetrarea în plagă a firelor de păr de la animalele de companie, poate conduce la contaminarea acestora

NOTĂ Orice incident grav care a avut loc în legătură cu produsele **TAISSIS CONCEPT S.R.L.** va fi raportat la **TAISSIS CONCEPT S.R.L.** și la autoritatea competentă din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul



Ultima revizie: Mai 2023

Simbol	Semnificație	Simbol	Semnificație
	Produsul este de unică utilizare		Înseamnă că este absolut necesar ca utilizatorul să citească prospectul înainte de utilizarea produsului
	Produsul este sterilizat cu radiații Gamma		Data de expirare
	Sistem unic de barieră sterilă		A se menține uscat!
	Ambalaj de protecție nesteril cu sistem de barieră sterilă în interior		A se feri de razele directe ale soarelui!
	A nu se resteriliza!		A se păstra la o temperatură mai mică de 35°C
	A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat!		Aruncarea ambalajului la coșul de gunoi
	Dispozitiv medical		Producător
	Referință produs (cod)		Identificator unic de dispozitiv
	Numărul de lot al produsului		Produsul respectă cerințele Directivei 93/42/EEC

 **TAISSIS CONCEPT S.R.L.**
RO,115100 Câmpulung
Str. Ion Țicăloiu, nr. 17
Tel: +40 248 512 830
Fax: +40 248 512 870
office@taissis.ro

**Statut de reglementare: Dispozitiv medical
clasa IIa conform Directivei 93/42/EEC**

Nr.: 03/01.1_1.00 (ro)